

# Primoport

Cateter Totalmente  
Implantado

Cateter Totalmente Implatable  
*Totally Implantable Catheter*

## Informações ao Paciente



Seu médico recomendou o uso do **PrimoPort®**, um cateter totalmente implantável, porque seu tratamento utilizará infusões freqüentes de medicamentos diretamente em sua corrente sanguínea.

As informações contidas neste informativo lhe ajudarão a entender e esclarecer suas dúvidas sobre o implante e uso do **PrimoPort®**.

Estas informações são oferecidas como uma referência. Seu médico ou enfermeira serão sua melhor fonte de informação. Sempre siga as recomendações de seu médico ou enfermeira sobre o implante e uso do seu **PrimoPort®**.

## O que é o **PrimoPort®** Cateter Totalmente Implantável?

2

Um cateter totalmente implantável ou *port* é composto por dois componentes, um pequeno reservatório e um tubo flexível.

O reservatório é selado internamente por uma membrana macia em silicone, chamada de septo. O reservatório é conectado a um tubo flexível, chamado de cateter. O reservatório é ajustado ao cateter, com segurança, através de um sistema de conexão.

Medicamentos e outros fluidos podem ser entregues diretamente na corrente sanguínea através de uma simples punção da pele, para acessar o reservatório. O septo é o local onde a agulha é inserida para infusão da medicação.

A medicação é levada do reservatório à corrente sanguínea através do cateter.

O **PrimoPort®** é muito discreto e será visto somente por uma área levemente saliente sob a pele. Geralmente não

são necessários cuidados diários e o *port* não afetará as suas atividades diárias.

O **PrimoPort®** é fabricado com materiais especialmente desenvolvidos para um uso seguro e prolongado no corpo humano.



3


Existem diferentes tipos e tamanhos de cateteres e reservatórios. Seu médico irá indicar o ideal para você e seu tratamento.

## Como o **PrimoPort®** é colocado no corpo?

O implante de um cateter do tipo *port* envolve um procedimento cirúrgico simples e rápido, com anestesia local. Na maioria das vezes, o paciente pode voltar para casa no mesmo dia.

## Onde o **PrimoPort**<sup>®</sup> é implantado?


Normalmente o **PrimoPort**<sup>®</sup> é implantado na parte superior do peito, logo abaixo da clavícula. O reservatório ficará logo abaixo da pele e o cateter será inserido dentro do vaso sanguíneo selecionado para receber a medicação. Seu médico irá escolher o local do implante do **PrimoPort**<sup>®</sup> que melhor se ajuste ao seu tratamento.

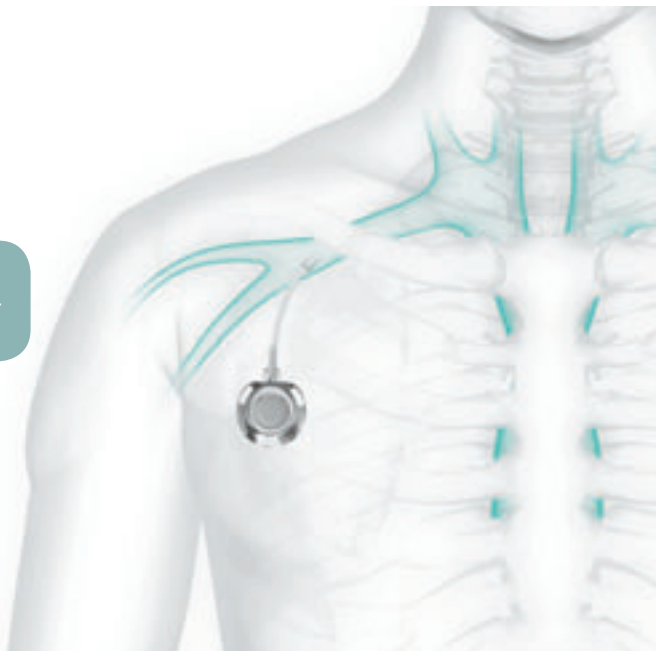

## Como o **PrimoPort**<sup>®</sup> funciona?

Logo após o implante do seu **PrimoPort**<sup>®</sup>, ele já estará pronto para uso, facilitando a realização de infusões de medicamentos diretamente em sua corrente sanguínea. O **PrimoPort**<sup>®</sup> também possibilita a coleta de amostras de sangue, sem a necessidade de picar suas veias periféricas

diretamente com a agulha. Quando uma infusão ou coleta é necessária, uma agulha especial é posicionada através do septo do reservatório. Isso torna o tratamento mais confortável. A maioria dos pacientes sente uma leve sensação de picada durante a colocação da agulha no septo. Geralmente esta sensação diminui ao longo do tempo.

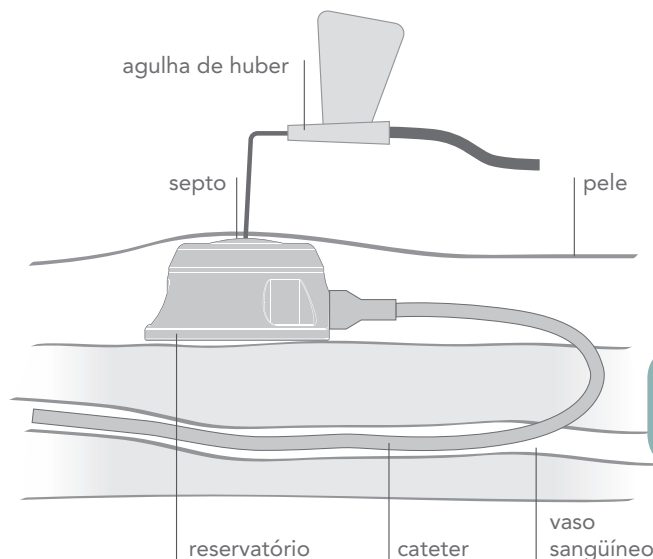

## Cuidados com seu **PrimoPort**<sup>®</sup>

Durante os primeiros dias após implantar seu **PrimoPort**<sup>®</sup>, será importante evitar exercícios intensos e seguir todas as recomendações de seu médico quanto aos cuidados com a pequena incisão. Após a cicatrização da incisão, não serão necessários cuidados especiais e você poderá retornar às atividades diárias. Consulte seu médico ou enfermeira sobre atividades repetitivas e específicas.

## Uso de seu **PrimoPort**<sup>®</sup>

O **PrimoPort**<sup>®</sup> pode ser utilizado para infusão de medicamentos de duas maneiras. Um método é chamado infusão em bolus, uma infusão rápida com permanência da agulha por um curto período. O outro método é a infusão contínua. Neste caso, um curativo será colocado sobre a agulha para mantê-la conectada ao reservatório durante um período mais longo, podendo inclusive, conectar-se a um infusor ambulatorial e realizar o tratamento em casa.

Após cada utilização, e ocasionalmente em períodos em que o **PrimoPort**<sup>®</sup> não está sendo utilizado, o reservatório e o cateter são “lavados” com uma solução especial. Consulte seu médico ou enfermeira para mais informações sobre o manutenção de seu **PrimoPort**<sup>®</sup>.

6



## Respostas a algumas perguntas que você pode ter sobre seu **PrimoPort**<sup>®</sup>

### O **PrimoPort**<sup>®</sup> irá afetar minhas atividades diárias?

Durante os primeiros dias após implantar seu **PrimoPort**<sup>®</sup> será importante evitar exercícios intensos e seguir todas as recomendações de seu médico quanto aos cuidados com a pequena incisão. Após a cicatrização da incisão, não serão necessários cuidados especiais e você poderá voltar às suas atividades diárias normais. Seu médico ou enfermeira são as melhores pessoas para lhe responder sobre atividades específicas.

7

### Devo utilizar curativo sobre o **PrimoPort**<sup>®</sup>?

Um curativo será necessário até a cicatrização da incisão. Depois da cicatrização, o curativo só será necessário se o **PrimoPort**<sup>®</sup> estiver em uso. Se estiver realizando uma infusão contínua de medicamentos, um curativo deverá ser utilizado para estabilizar e proteger a agulha.

### Devo evitar determinados tipos de roupas?

Seu médico ou enfermeira serão os mais indicados a informar, pois a resposta dependerá do local em que seu **PrimoPort**<sup>®</sup> foi implantado. Roupas com suspensórios e alguns tipos de alças de sutiãs deverão ser evitados.

## O que faço se tiver perguntas ou suspeitar de algum problema?

Lembre-se que após a cirurgia você poderá apresentar vermelhidão na área de incisão, o que normalmente melhora nas primeiras 24 a 48 horas. Entretanto, contate seu médico ou enfermeira se notar mudanças não usuais na pele ao redor de seu **PrimoPort®**, como aumento do inchaço ou sensibilidade. Se apresentar dor, febre, calafrio, falta de ar ou tontura, contate imediatamente seu médico.

## O que eu faço se meu médico ou enfermeira não estiverem disponíveis?

Após o implante, você receberá de seu médico ou enfermeira um cartão de identificação que contém informações importantes sobre o seu **PrimoPort®**.

Com estas informações, outro profissional da saúde qualificado poderá prover assistência.

## Quem paga pelo cateter totalmente implantável?

Geralmente seu seguro ou plano de saúde paga, totalmente ou em parte, os custos do dispositivo, honorários do cirurgião e despesas hospitalares. Como os contratos e apólices variam, é recomendável que você verifique com sua empresa de seguro ou plano de saúde primeiramente.

## O **PrimoPort®** irá ativar alarmes de segurança, como em bancos ou aeroportos?

Os sistemas de segurança geralmente não detectam a pequena quantidade de metal do dispositivo. Se isso ocorrer, simplesmente mostre seu cartão de identificação.

## O **PrimoPort®** é compatível com ressonância nuclear magnética, tomografia computadorizada ou radioterapia?

Sim. Todo **PrimoPort®** é isento de materiais ferromagnéticos e, portanto, compatível com a ressonância nuclear magnética, tomografia computadorizada ou radioterapia.

## Por quanto tempo usarei o **PrimoPort®**?

O **PrimoPort®** poderá ficar implantado por tanto tempo quanto seu médico julgar necessário.

## O **PrimoPort®** poderá ser retirado caso seu uso não seja mais necessário?

Sim. O **PrimoPort®** poderá ser cirurgicamente removido, em um procedimento similar ao implante.



[www.primoport.com.br](http://www.primoport.com.br)



**Importado e distribuído por:**

BMR Medical Ltda.

Av. Cândido Hartmann, 570 cj. 174, Curitiba, PR

Fone 41 3339 7688 - Fax 41 3335 7217

[www.bmrmedical.com.br](http://www.bmrmedical.com.br)

[sac@bmrmedical.com.br](mailto:sac@bmrmedical.com.br)

